



Bruksanvisning Spineboard X-Straight

SE-0080

(uten stropper)

SE-0081

(med 3 stropper)



Innholdsfortegnelse

Produsent	3
Kundeservice	3
Garanti.....	3
Igangsetting	4
Bruksanvisning.....	5
Vannledning	6
Tester.....	8
Formålstjenlig bruk	8
Erklæring om samsvar	8
Oppbevarings- og bruksbetingelser	9
Levetid	9
Rengjøring	9
Tekniske data	9
Tilbehør/ -tilbehør	10

Produsent

SmartEm er en ledende produsent av utstyr for bruk i nødssituasjoner.

Mange års erfaring med produksjon og distribusjon av avansert teknologi er den beste garantien for høy kundetilfredshet.

SmartEm er selvfølgelig sertifisert i henhold til DIN ISO 9001 og viser dermed den høye standarden i produktproduksjon og teknologi.

Kundeservice

Hvis du har problemer med bruken eller vedlikeholdet, kan du kontakte SmartEm eller din SmartEm-forhandler.

Vi tar også gjerne imot ros og kritikk av produktene våre. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av produktene og prosessene.

Trenger du bruksanvisningen på andre språk? Ikke noe problem, ta gjerne kontakt med oss.

Du finner også mer informasjon på vår hjemmeside www.smartemergency.de



Garanti

Produsenten gir 24 måneders garanti på dette produktet. Denne omfatter kun kostnadene for reservedeler; arbeidskostnader og eventuelle fraktkostnader er ikke inkludert.

Følgende skader er unntatt fra garantien:

- Transport
- Feil bruk
- Feil, ukorrekt eller manglende vedlikehold av brettet
- Skader og/eller brudd som skyldes feil bruk av brettet

- Brudd på brettet
- Vanlig slitasje
- Skader på komponenter som utelukkende har en estetisk funksjon
- Reparasjoner utført av uautoriserte personer
- Feil bruk i strid med bruksanvisningen
- Skader forårsaket av bruk av produktet i uegnet miljø eller under uegnede forhold

Garantikrav kan kun innvilges med et gyldig serienummer.

Igangsetting

Viktig: Registrer Spineboard online

Dette brettet har en ny teknologi. Serienummerklistremerket er samtidig adgangskortet til din egen og sikre SmartEm-Cloud.

Du kan aktivere og registrere Spineboard her ved å holde en NFC-kompatibel enhet (smarttelefon, nettbrett eller lignende) mot klistremerket. Dermed blir du automatisk ført til din personlige sky. Alternativt kan du også skanne QR-koden eller gå til den påtrykte nettadressen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

1. Kontroller at innholdet er komplett når du mottar varen. Innholdet kan variere litt avhengig av bestillingen.
2. Forsikre deg om at brettet er utstyrt med et serienummer fra fabrikkens. Registrer deg med dette nummeret i din personlige SmartEm-sky.
3. Sett brettet i «klar til bruk»-tilstand ved å
Monter de medfølgende delene – f.eks. stropper, hodestøtte, stroppestinne osv. – på brettet på riktig måte og i henhold til instruksjonene.
4. Fyll ut online-kontrollboken med all nødvendig informasjon for å kunne dokumentere en eventuell kontroll av testene fullstendig.

Bruksanvisning

1. Før du flytter pasienten, bør du fikse pasientens nakkesøyler (f.eks. med nakkekrage).
2. Plasser nå ryggbrettet på siden, langs siden av pasienten.
3. To hjelpere kneler overfor hverandre ved siden av pasienten. Den ene omfavner den motsatte skulderen og låret, den andre hoften og kneleddet til pasienten.
4. På instruksjon fra hjelperen ved hodet blir den skadde personen snudd så langt som nødvendig på siden for å kunne skyve inn ryggbrettet. Så snart pasienten ligger på ryggbrettet, kan han sakte snus tilbake til horisontal stilling. Hjelperne griper tak slik at de kan skyve pasienten jevnt inn mot midten av brettet.
5. Så snart den skadde ligger midt på ryggbrettet, kan hodet eventuelt festes ved hjelp av en hodestøtte. Hodet holdes fast i hendene til hjelperen til immobiliseringen er sikkert festet.
6. Fiksering med stropper utføres:
 - ✓ i brysthøyde,
 - ✓ i bekkenhøyde og
 - ✓ under kneskålene.

Hvis pasienten fortsatt ikke ligger sikkert på brettet, kan flere stropper brukes, f.eks. i høyden av under- eller lårbenet.
7. Hvis pasienten festes til ryggbrettet ved hjelp av et stroppesystem, plasseres den Y-formede delen av systemet mot skulderen, mens resten av stroppene legges midt over pasienten. Stroppene festes løst fra hode til fot. Deretter strammes borrelåsstroppene i samme rekkefølge til pasienten er sikkert festet til ryggbrettet.
8. Transporten utføres ideelt sett med tre til seks hjelpere, som hver kan gripe tak i de forhåndsdefinerte utsparingene på siden.

Vannredning

X-Straight er blant annet utviklet for vannredning. Den har tilstrekkelig oppdrift til å holde personer opptil 80 kg (uten støtte) på vannoverflaten.

Siden dette ikke er standard på ryggbrett, ønsker vi i dette kapittelet å gi brukerne en kort veiledning i bruk:


1. Sikre den skadde og bring ham/henne til ryggbrettet (hvis brettet ikke allerede er på plass).



2. La X-Straight gli ned i vannet på siden under den skadde, eller skyv den inn under pasienten på siden.



3. Fest pasienten med beltesystemet (enkeltpeltes eller spindel). I eksemplet ble dette gjort utenfor vannet for bedre synlighet.

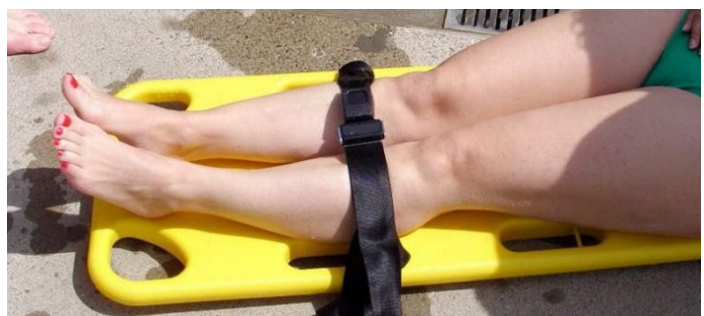

4. Bær den skadde på brettet ut av fareområdet til land, til en festepunkt eller til båten.



5. Nå kan den skadde transporteres videre ved hjelp av brettet.



Kontroller

Brettet bør kontrolleres etter hver bruk, men minst en gang i året, på følgende måte:

1. Undersøk materialet rundt om for sprekker, alvorlige skader eller hvite, lyse brudd i platen.
2. Kontroller stroppene eller stropesystemene for slitasje eller sprekker.
3. Kontroller stropespenner for bevegelighet, lukkefasthet og eventuelle skader. For beltesystemer med borrelås må du i tillegg kontrollere borrelåsens klebeevne.
4. Belast brettet med 150 kg i henhold til EN 1865 (belastbarhet).

Hvis det er klager eller tvil om ett eller flere av de ovennevnte punktene, må brettet umiddelbart tas ut av bruk. Ved tvil, kontakt produsenten.

Riktig bruk

Brettet er beregnet for transport av skadde personer av utdannede redningsmenn. Uformålmessig eller feil bruk kan føre til alvorlige skader på den skadde og redningsmennene, samt skade på brettet. Slike tilfeller er unntatt fra bruksgodkjenningen, ansvaret og garantien.

Erklæring om samsvar

X-Straight Spineboard er produsert og testet i henhold til gjeldende EU-direktiv. En samsvarserklæring for dette produktet kan fås via SmartEm-nettbutikken, en forhandler eller direkte fra SmartEm.

Oppbevarings- og bruksbetingelser

Både under drift og ved lagring:

Temperaturer mellom -20 °C og +60 °C må ikke overskrides eller underskrides.

Brettet må oppbevares tørt og beskyttet mot UV-stråling. Den mest hensiktsmessige løsningen er den separat tilgjengelige beskyttelsesposen.

Levetid

Levetiden avhenger av individuelle bruksforhold, hvorved spineboard-kroppen, som er laget av HDPE-plast, er utsatt for en aldringsprosess selv ved forsiktig håndtering..

Generelt gjelder følgende:

Ved riktig oppbevaring og en lagringstid på maksimalt 2 år er det mulig å oppnå en levetid på maksimalt 10 år fra første gangs bruk.

Rengjøring

For rengjøring av brettet kan du bruke milde vaskemidler, såpevann eller alkoholfrie overflatedesinfeksjonsmidler. Ikke bruk metalliske gjenstander til rengjøring.

Tekniske data

Mål:	1880 x 44 x 70 mm
Vekt:	6,3 kg
Maksimal belastningsevne:	250 kg
Testet i henhold til:	DIN EN 1865-1 C DIN EN 1789

Tilbehør

Erstatningsbelter for X-Straight

SE-0025-3 Pasientbelte, sett med tre

SE-0025-4 Pasientbelte, sett med fire

SE-0025-S Pasientbelte, svart

Oppbevaringspose

SE-0088 X-Straight BAG

Hodestøttesystem

SE-0085/M Hodestøtte

Sele

SE-0086 Beltefeste PROSpider med borrelås

SE-0087 Beltefeste PROSpider X-Fast med spenner